


NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres,
il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes

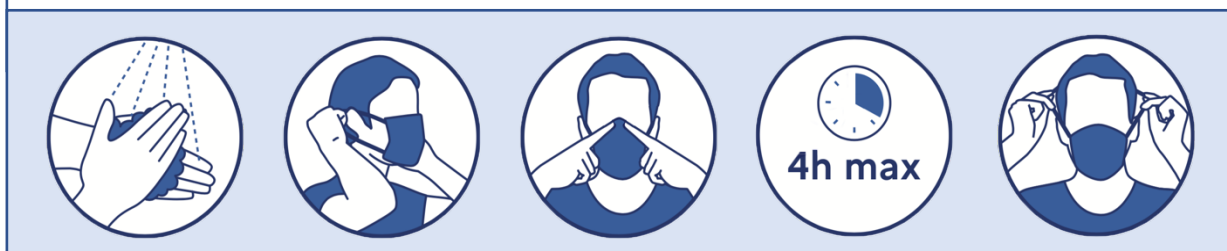

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

05. Tenez le masque par les lanières élastiques.
06. Placez-le au niveau de votre bouche.
07. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
08. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton: vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.

Lorsque vous le portez :

09. Évitez de le toucher et de le déplacer.
10. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s'humidifie.
5. Si le masque est endommagé.
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

11. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
12. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
13. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
14. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
15. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les Mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

<p>Avant ouverture :</p> <p>01. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.</p> <p>Pour le lavage :</p> <p>01. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge dans un filet de protection.</p> <p>02. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.</p> <p>03. Ce masque a été testé pour 20 lavages. Après 20 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.</p> <p>05. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.</p>	<p>Après le lavage :</p> <p>06. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches</p> <p>07. Pour cela, vous pouvez: utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.</p> <p>08. Repassage de votre masque à température de 110° (maximum)</p> <p>09. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).</p>
---	---

SÉCURITÉ

Rapports complets disponibles sur le site www.masqueprotectionlavable.fr

01. Ce masque a démontré une efficacité de filtration > 90% pour des particules de 1 µm et 3 µm (microns) émises par la personne portant le masque.

Résultats Rapport Tests DGA avant lavage = 97 %

Résultats Rapport Tests DGA après 10 lavages = 98 %

Résultats Rapport Tests IFTH après 20 lavages = 99 % pour particules de 3 µm

02. La respirabilité du masque a été mesurée > à 96 L.m⁻².s⁻¹

Résultats Rapport DGA avant lavage = 483 L.m⁻².s⁻¹

Résultats Rapport DGA après 10 lavages = 582 L.m⁻².s⁻¹

Résultats Rapport IFTH après 20 lavages = 540 L.m⁻².s⁻¹

et doit permettre son port pour une durée de 4h.

NOTE : Pour les Tests effectués par L'IFTH : Le banc utilisé est un banc à filtration aérosol qui s'inspire du banc tulipe détaillé dans la note interministérielle de la DGA du 25 mars 2020.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage.

Il convient de suivre scrupuleusement
les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

DECOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques ont été stérilisés et sont livrés en sachet.
Ils peuvent être lavés jusqu'à 20 fois, chaque masque est donc utilisable 21 fois.

Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques,
veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :



PRODUXTYL <small>Vêtements Professionnels</small>		TABLEAU DE DECOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES:				
Nom de l'utilisateur:	MASQUE	MASQUE	MASQUE	MASQUE	MASQUE	
	1	2	3	4	5	
UTILISATION 1						
UTILISATION 2						
UTILISATION 3						
UTILISATION 4						
UTILISATION 5						
UTILISATION 6						
UTILISATION 7						
UTILISATION 8						
UTILISATION 9						
UTILISATION 10						
UTILISATION 11						
UTILISATION 12						
UTILISATION 13						
UTILISATION 14						
UTILISATION 15						
UTILISATION 16						
UTILISATION 17						
UTILISATION 18						
UTILISATION 19						
UTILISATION 20						
UTILISATION 21						

www.masqueprotectionlavable.fr